




Comment lire la feuille de résultats ?

Cette notice présente l'ensemble des tests diagnostiques BioPredictive des principales maladies du foie. Les données utilisées pour les tests ci-dessous sont fictives et n'ont qu'une valeur explicative. Le résultat de votre examen personnel ne figure pas sur ce document, mais sur votre feuille de résultat.



FibroTest

estime les cicatrices du foie (fibrose)

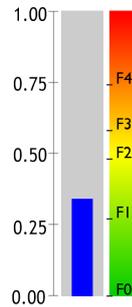

FibroTest est le test qui permet d'estimer la fibrose du foie ::


- ▶ F0 : pas de fibrose
- ▶ F1 : fibrose minime
- ▶ F2 : fibrose modérée
- ▶ F3 : fibrose avancée
- ▶ F4 : fibrose sévère

La fibrose : lésion provoquée par le foie en réaction à l'attaque du virus de l'hépatite, des graisses ou de l'alcool. On compare usuellement la fibrose du foie à une cicatrice qui progresse dans le foie



SteatoTest 2

estime la surcharge en graisse (stéatose ou foie gras)

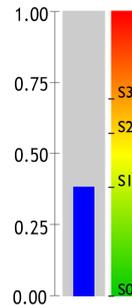

SteatoTest 2 est le test qui permet d'estimer la stéatose :


- ▶ S0 : pas de stéatose (<5%)
- ▶ S1 : stéatose minime (mais cliniquement significative) (5-33%)
- ▶ S2/S3 : stéatose importante à sévère (cliniquement significative) (34-100%)

La stéatose : accumulation de graisse dans le foie, provoquée par les anomalies du métabolisme (cholestérol, triglycérides, diabète, surpoids). La stéatose est communément appelée foie gras.



ActiTest

estime l'activité (l'inflammation pour hépatite chronique virale C ou B)

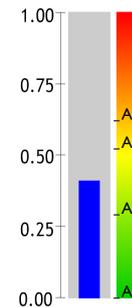

ActiTest est le test qui permet d'estimer l'inflammation :


- ▶ A0 : pas d'activité
- ▶ A1 : activité minime
- ▶ A2 : activité importante
- ▶ A3 : activité sévère

L'activité : inflammation du foie provoquée par le virus. On compare souvent l'activité à une brûlure.



NashTest 2

estime l'inflammation (pour les maladies métaboliques : diabète, surpoids, cholestérol, triglycérides)

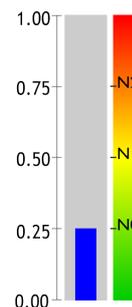

NashTest 2 est le test qui permet d'estimer la NASH :


- ▶ N0 : pas de NASH
- ▶ N1 : NASH minime
- ▶ N2 : NASH modérée
- ▶ N3 : NASH sévère

La NASH : inflammation du foie associée à la stéatose (foie gras). La NASH est la réaction excessive de l'organisme face à l'accumulation de



AshTest

estime l'inflammation (si trop d'alcool)

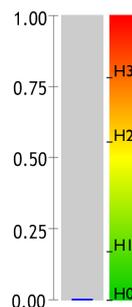


AshTest est le test qui permet d'estimer l'inflammation alcoolique ::

- ▶ H0 : pas d'inflammation alcoolique
- ▶ H1 : inflammation alcoolique modérée
- ▶ H2 : inflammation alcoolique importante
- ▶ H3 : inflammation alcoolique sévère

L'activité : inflammation du foie provoquée par l'alcool. On compare souvent l'activité à une brûlure.

Nom du Test

FibroTest

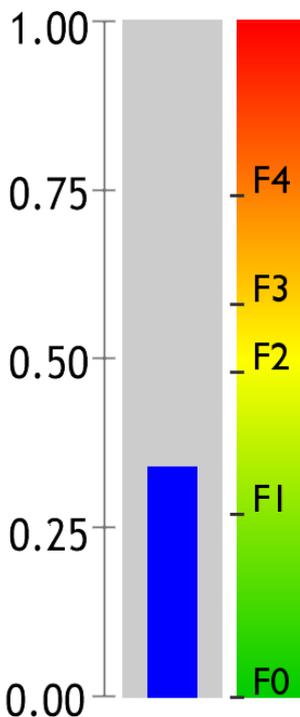

Score: 0.31

(F1)

Le résultat de 0 à 1

Son interprétation (voir ci-contre)